

Apteo Care, Woda morska hipertoniczna, spray do nosa powyżej 3 roku życia, 100ml



Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Woda morska hipertoniczna Apteo to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w codziennej higienie nosa w celu utrzymania jego prawidłowych funkcji; pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego; łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii. Produkt jest odpowiedni dla osób dorosłych oraz dzieci od 3. roku życia.

Właściwości

Woda morska Apteo Care to naturalny, izotoniczny spray do nosa zawierający wodę morską bogatą w minerały i mikroelementy, pochodzącą z wód głębinowych Oceanu Atlantyckiego. Sól zawarta w wodzie morskiej rozrzedza gęstą wydzielinę, oczyszcza i udrażnia nos oraz nawilża podrażnioną śluzówkę. Produkt wypłukuje z nosa kurz i alergeny, dzięki czemu znacząco ułatwia swobodne oddychanie. Hipertoniczna woda morska Apteo nie zawiera konserwantów ani propolentów.

Składniki

Naturalna sól morska, woda odmineralizowana.

Stosowanie

Zdjąć osłonkę z aplikatora, przygotować butelkę pompując spray kilkakrotnie do wytworzenia jednolitej dawki. Następnie wprowadzić aplikator do otworu nosowego naciskając obustronnie podstawę aplikatora. Po każdorazowym użyciu należy oczyścić aplikator i nałożyć osłonkę z powrotem.

- Dzieci od 3 roku życia: 1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.
- Dorośli: 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

Ważne informacje

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.