

Argotiab 2%, krem 50ml



Cena: 37,01 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-----------|---------------------|
| Dawka | - |
| Producent | HEXANOVA SP. Z O.O. |

Opis produktu

Wskazania

Wyrób medyczny wspomagający w leczeniu i regeneracji zmian skórnych, ran, otarć, oparzeń i odleżyn, maceracji skóry spowodowanej podrażnieniem przez nietrzymanie moczu u osób w podeszłym wieku lub wysypki pieluszkowej u dzieci, miejsc wprowadzenia cewnika naczyniowego (obwodowego i centralnego cewnika żylnego i tętniczego). Sprzyja prawidłowemu gojeniu.

Jak stosować Argotiab® 2% krem ze srebrem?

- Przed użyciem oczyścić skórę, np. roztworem soli fizjologicznej i dobrze wysuszyć
- Nałożyć cienką warstwę żelu na zmienione miejsce
- Nie wmasowywać
- Pozostawić do samoistnego wyschnięcia
- Czynność powtórzyć dwa razy dziennie

Ostrzeżenia dotyczące Argotiab® 2% krem ze srebrem.

- Nie stosować produktu w innym wskazaniu niż podane w ulotce informacyjnej
- Umyć ręce przed zastosowaniem produktu
- Po zastosowaniu nie masować zmienionego miejsca i pozostawić wyrób medyczny do naturalnego wyschnięcia; żel musi utworzyć ochronną cienką błonę
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu niezwłocznie przemyć oczy wodą.
- Nie stosować wyrobu medycznego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
- Przechowywać w temperaturze pokojowej i trzymać z dala od źródeł ciepła

- Nie zamrażać
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Do użytku zewnętrznego – nie spożywać
- Nie stosować w przypadku, gdy oryginalne opakowanie jest uszkodzone lub otwarte
- Po użyciu zamknąć tubkę
- Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na składniki
- Przerwać stosowanie w przypadku obecności nieprawidłowych reakcji skórnych
- W przypadku długotrwałego stosowania skontaktować się z lekarzem

Działania niepożądane

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania.

Nadwrażliwość na składniki produktu.

Nie stwierdzono przypadków interakcji z lekami i substancjami medycznymi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.