

Compeed, Plastry na pęcherze mix, 5 sztuk



Cena: 28,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu

Wyrób medyczny Compeed Plastry na pęcherze mix rodzajów to kompleksowe rozwiązanie na pęcherze stóp, niezależnie od przyczyny ich wystąpienia (np. bieganie, nowe buty itp.). Produkt przynosi natychmiastową ulgę w bólu i wspomaga naturalne leczenie.

Działanie

Plastry Compeed na pęcherze zmniejszają tacie i nacisk, dzięki czemu minimalizują uczucie bólu. Wilgotne środowisko tworzące się pod powierzchnią plastra przyspiesza naturalne procesy regeneracyjne. Ultraprzylepne krawędzie i wodoodporna powłoka umożliwiają noszenie plastra nawet przez kilka dni, a także chronią przed przedostaniem się drobnoustrojów.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem.
2. Usuń warstwę papierową plastra, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
4. Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni).
5. W razie potrzeby zaaplikuj nowy plaster

Zawartość opakowania

- Plaster średni - 2 sztuki

- Plaster wąski - 2 sztuki
- Plaster na palce stóp - 1 sztuka

Skład

Plaster hydrokoloidowy.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie powinno się celowo przekłuwać pęcherzy, ponieważ goją się one lepiej pod warstwą zapewniającego ochronę naskórka.

Nie stosować na zainfekowane rany.

Nie używać ponownie - grozi to pojawieniem się infekcji.

Nie należy przecinać plastrów.

W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.