

# Compeed, Plastry na zrogowacenia, rozmiar 4,4x4,5cm, 6 sztuk



Cena: 25,38 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

Compeed Plastry na zrogowacenia średnie to wyrób medyczny wskazany do pielęgnacji stóp. Polecany w celu redukcji średniej wielkości zrogowaceń skóry i bólu z nimi związanego.

### Właściwości:

Compeed Plastry na zrogowacenia średnie zawierają technologię hydrokoloidową aktywnego żelu, wspomagającą nawilżanie.

- Działają jak druga skóra, pozostając na miejscu przez 24h\*;
- natychmiast łagodzą ból spowodowany w wyniku ucisku i zrogowaceń;
- chronią przed otarciami;
- nawilżają i zmiękczeją nagromadzony naskórek, pomagając go usunąć.

\* w indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić

### Stosowanie

1. Zmiękczyć skórę poprzez wymoczenie stopy w ciepłej wodzie.
2. Usunąć zrogowaciałą skórę, delikatnie ścierając ręcznikiem.
3. Umyć i osuszyć skórę. Usunąć górną warstwę papierową plastra, następnie dolną warstwę, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
4. Nałożyć plaster mocno na zrogowaciałe miejsce.
5. Pozostawić plaster na zrogowaceniu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni.
6. Powtarzać zabieg aż do momentu, gdy skóra będzie całkowicie wyleczona.

## Ważne informacje

Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie stosować na zainfekowane rany.

Nie stosować ponownie w celu uniknięcia infekcji.

Nigdy nie przecinać plastrów COMPEED®.

Pozostałości kleju na odzieży można usunąć za pomocą spirytusu, przestrzegając ostrzeżeń dotyczących tkaniny.

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**