

## CRP-Screen, ultraczuły test CRP (8-100 mg/L) z krwi, diagnostyka infekcji i stanów zapalnych, 1 sztuka

Cena: 40,56 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.

### Opis produktu

Profesjonalny test domowego użytku do badania poziomu białka CRP. Wskaźnik CRP pomaga rozpoznać podłoże choroby (bakteryjna czy wirusowa) oraz stany zapalne w organizmie.

CRP-Screen to jedyny, dedykowany zarówno dla pacjentów oraz profesjonalistów test, w którym wynik zostaje umiejscowiony w jednym z 4 zakresów badania: 1# norma# od 8 do 40 mg/L # nasileniu# od 40 do 100 mg/L # 4# najczęściej w ciężkich zakażeniach o podłożu bakteryjnym

Wykonanie testu oraz odczytanie wyniku badania jest szybkie i proste - zajmuje 10 minut. Wiarygodność testu CRP-Screen jest bardzo wysoka - wynosi 98%.

### Zastosowanie

badanie poziomu białka C-reaktywnego, diagnostyka infekcji i stanów zapalnych.

### Sposób użycia

umyj ręce mydłem i opłucz pod bieżącą, czystą wodą. Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę. Odkręć butelkę z zakraplaczem zawierającą diluent. Dociśnij mocno mały pomarańczowy element, aż usłyszysz

kliknięcie wskazujące, że urządzenie jest aktywowane. Zdejmij pomarańczowy element obracając go w prawo lub lewo. Zdezynfekuj opuszek środkowego lub wskazującego palca dłoni.

Aby zwiększyć ukrwienie pomasuj wybrany opuszek palca. Mocno dociśnij lancet do zdezynfekowanej części opuszka, tak aby znajdował się w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Naciśnij przycisk wysuwający lancet. Końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu. Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi. Nie uciskając pipety, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Krew migruje przez kapilarę aż do linii wyznaczonej na pipecie w miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza. Krew pobraną za pomocą pipety przenieś do otwartej butelki z diluentem, upewniając się, że cała objętość pobranej krwi trafiła do butelki, Następnie zakręć nakrętkę zakraplacza i dobrze wymieszaj. Złam końcówkę zakraplacza zawierającą próbkę krwi, a następnie dodaj 4 krople rozcieńczonej próbki krwi do dołka próbkowego. Odczytaj wynik testu po 5 minutach. Nie interpretuj wyniku testu po 10 minutach.

### Zestaw zawiera

- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca: płytkę testową, plastikową pipetę, saszetkę z pochłaniaczem wilgoci
- 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 3ml diluentu
- 1 sterylny lancet do pobierania krwi
- 1 ulotkę z instrukcją użytkowania

### Ważne wskazówki

Test należy przechowywać w temperaturze pokojowej (od 4 do 30 stopni Celsjusza), w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.