

CURAPROX, koncentrat do protez BDC105, 100ml



Cena: 35,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	CURADEN POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Koncentrat polecany do cotygodniowej intensywnej higieny. Efekt biologicznego czyszczenia z CURAPROX BDC - # Care# proteza pozostaje czysta, gładka i błyszcząca przez lata.

Zastosowanie

czyszczenie protez zębowych

Sposób użycia

napełnij koncentratem BDC pojemnik BDC BOX do momentu, aż kratka będzie zakryta. Włóż protezę do środka i napełnij chłodną wodą do całkowitego zanurzenia protezy. Dla osiągnięcia najlepszych efektów zostaw protezę na 6-8 godzin. Przepłucz dobrze przed ponownym jej założeniem.

Składniki

olejek eukaliptusowy, olejek eukaliptusowy, sól morską, kwas cytrynowy, kwas cytrynowy.