

Gum Sunstar, Wosk ortodontyczny o smaku miętowym



Cena: 9,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka

-

Producent

SUNSTAR EUROPE S.A.

Opis produktu

Wosk zapobiega uczuciu dyskomfortu i przeciwdziała podrażnieniom policzków oraz dziąseł spowodowanym ostrymi elementami aparatu ortodontycznego. Podzielony na mniejsze fragmenty dla większej higieny i wygodniejszej aplikacji.

Aparat ortodontyczny, szczególnie w pierwszych dniach po założeniu, może miejscowo podrażniać tkanki miękkie w jamie ustnej. Wosk ortodontyczny **GUM Ortho** tworzy ochronną barierę pomiędzy aparatem a podrażnieniami. Po prostu oderwij kawałek wosku, rozgrzej w palcach i nanieś na fragment aparatu który powoduje podrażnienia.

Uwaga! W opakowaniu **dodatkowo specjalne lusterko**, które umożliwia aplikację w każdym momencie!

Dla kogo przeznaczony jest wosk GUM?

- pierwsze dni po umieszczeniu aparatu ortodontycznego lub po kolejnych korektach
- w przypadku zerwania jakiejś części aparatu ortodontycznego w celu zabezpieczenia miejsca do czasu wizyty u lekarza
- w dowolnym momencie odczuwania dyskomfortu podczas leczenia, przez jakiegokolwiek element aparatu ortodontycznego

Dlaczego wybrać wosk GUM?

- wosk jest ponacinany na kawałki o odpowiedniej wielkości
- pozostaje na aparacie przez wiele godzin od aplikacji
- łatwy do usunięcia podczas szczotkowania zębów

- lusterko na odwrocie blistra ułatwia aplikację kiedy tylko zajdzie taka potrzeb
- **miętowy smak**

Sposób użycia wosku GUM ORTHO:

1. Odłam niewielki kawałek wosku ortodontycznego
2. Rozgrzej wosk w palcach, aby był plastyczny
3. Osusz miejsce (element), na który chcesz nakleić wosk
4. Naklej wosk w odpowiednie miejsce

Opakowanie: 5 pałeczek w jednym opakowaniu