

# Jobst, Travel Podkolanówki beżowe uciskowe CCL1 - 1 klasa kompresji, rozmiar 2



Cena: 69,00 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Czym wyróżniają się podkolanówki Jobst Travel:

- Idealne w podróży - stworzone specjalnie dla osób odbywających wielogodzinne podróże
- Zmniejszają uczucie opuchniętych nóg - przynoszą ulgę, gdy pojawia się uczucie ciężkich i opuchniętych nóg
- Oddychające - materiał przepuszcza powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień
- Odprowadzające wilgoć - pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień

### Właściwości

- Klasa kompresji: 1 (15-20 mmHg)
- Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn
- Występują w wersji z palcami zamkniętymi
- Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
- Występują w kolorach czarnym i beżowym

### Wskazania

- Żylaki pierwotne i wtórne oraz żylaki i obrzęki w okresie ciąży
- Niewydolność żył głównych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowe) oraz stany po wyleczonym zapaleniu żył
- Profilaktycznie w celu zapobiegania zakrzepicy i w stanach po przebytej zakrzepicy

- Zespół pozakrzepicowy
- Chroniczna niewydolność żył od I do III stadium według Widmera
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
- Obrzęk limfatyczny i lipemiczny
- Cykliczne obrzęki samoistne
- Angiodysplazja
- Pomocniczo w leczeniu stwardnienia naczyń i po operacjach żył
- Zatory w wyniku unieruchomienia (artogeniczny zespół zatorowy, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

## Jak dobrać odpowiedni rozmiar?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

## Sposób zakładania

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

## Sposób czyszczenia i przechowywania

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## Bezwzględne przeciwwskazania

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Phlegmasia coerulea dolens

## Względne przeciwwskazania

- Sączące dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów