

## Leukoplast, Plaster elastic, rozmiar 6cm x 1m, 1 sztuka



Cena: 9,38 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Postać	-
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.

### Opis produktu

Leukoplast Elastic to elastyczne opatrunki pierwszej pomocy na drobne rany i skaleczenia oraz otarcia. Dzięki wysokiej elastyczności i przyczepności są idealne do opatrywania palców i innych często poruszanych części ciała. Nietkany opatrunek na ranę jest chłonny, ale nie przykleja się do rany.

- Nie przykleja się do rany - Miękki opatrunek Leukoplast elastic jest nietkany i lekko tylko przylega do powierzchni rany, dzięki czemu nie przykleja się do niej.
- Duża przyczepność - Dobra przyczepność, dzięki czemu można ufać, że opatrunek pozostanie na swoim miejscu nawet na wyprofilowanych i ruchomych częściach ciała.
- Wysoce elastyczny - Wykonany z elastycznego materiału, który dopasowuje się do konturów i ruchów ciała, dobrze przylegają nawet do trudnych miejsc. Opatrunki przyklejają się mocno, jednocześnie pozwalając na normalny ruch, dzięki czemu idealnie nadają się do opatrywania palców i stawów, takich jak łokcie, kolana i nadgarstki.
- Szybkie leczenie drobnych ran - Opatruj drobne rany, takie jak zadrapania, otarcia, skaleczenia i rany klute szybko i łatwo za pomocą plastrów z opatrunkiem Leukoplast.

### Sposób użycia

1. Usuń folię ochronną  
Trzymając plaster w jednej ręce, oderwij górną folię ochronną.
2. Przyklej na skórę i usuń drugą folię ochronną  
Umieść opatrunek centralnie na ranie. Upewnij się, że dotykasz tylko plastra na folii ochronnej i tylnej stronie, nigdy samego opatrunku. Usuń pozostałą folię ochronną.

3. Wygładź i przyciśnij

Wygładź opatrunek, aby równomiernie przylegał. Zastosuj tylko lekki nacisk i nie naciągaj plastra. Aby zwiększyć siłę klejenia, przed nałożeniem można ogrzać plaster w dłoniach.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.