

Microdacyn 60 Wound Care, elektrolizowany roztwór do leczenia ran, 250 ml



Cena: 41,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	KIKGEL MIROSŁAW KIK

Opis produktu

Wskazania

Microdacyn 60 Wound Care to wyrób medyczny opracowany w celu leczenia oraz odkażaniu ran, owrzodzeń, ran w przebiegu stopy cukrzycowej, oparzeń, owrzodzeń, ran pooperacyjnych czy owrzodzeń nowotworowych.

Właściwości

Microdacyn jest biologicznie aktywnym środkiem opracowanym do oczyszczania, odkażania, przepłukiwania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Za sprawą swojego składu, produkt łączy w sobie wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową (zwalcza: bakterie, wirusy, grzyby, zarodniki) i przeciwzapalną przy jednoczesnym wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zdrowych komórek. Co więcej, Microdacyn jest hipoalergiczny, nie wywołuje niepożądanych reakcji alergicznych, niweluje nieprzyjemny zapach z rany, a także przyspiesza ich gojenie. Produkt może być również stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgna. Roztwór jest dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.

Skład

Woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) – 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCl) – 40 ppm.

Stosowanie

Przy pomocy sterylnej, nawilżonej gazy zaaplikować preparat bezpośrednio na ranę. Procedurę należy powtarzać 2 razy dziennie. Zaaplikować na 15 minut podczas każdorazowej zmiany opatrunku. W przypadku przyschniętego opatrunku nasączyć go preparatem Microdyn, dzięki czemu ułatwi się jego usunięcie. Nie trzeba dodatkowo przemywać rany przed użyciem preparatu.

Ważne informacje

Preparat wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie stosować do wstrzykiwań ani spożycia.