

Sutricon, Żel na blizny silikonowy, 15ml



Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	VERCO

Opis produktu

Działanie i właściwości

Sutricon żel na blizny silikonowy poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Może być stosowany w celu wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów. Łagodzi objawy związane z posiadaniem blizny takie jak świąd czy uczucie ciągnięcia.

- Zmniejsza widoczność blizn i wyrównuje jej koloryt.
- Zapewnia matowe wykończenie bez efektu świeżącego filmu (non-oily).
- Żel o lekkiej, niewodnistej konsystencji.
- Efekt szybkiego wysychania na powierzchni skóry – może być stosowany pod makijaż.
- Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem blizny.
- Może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Zastosowanie / wskazania

Sutricon żel na blizny silikonowy to wyrób medyczny do codziennej pielęgnacji blizn zlokalizowanych na odkrytych i ruchomych powierzchniach ciała i twarzy, a także blizn:

- po liftingu twarzy i szyi,
- po korekcie powiek,
- po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift),
- po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry na ruchomych partiach ciała,
- po przeszczepie skóry w okolicy twarzy,
- zlokalizowane w obrębie stawów i zgięć kończyn górnych i dolnych,
- przerostowe i bliznowce,
- o długości do 10 cm.

Składniki

Polisiloksany, dwutlenek krzemu

Stosowanie Sutricon żel na blizny silikonowy

Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejda wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie.

Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkowań genetycznych oraz od jej rodzaju:

- minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn,
- w przypadku starszych blizn na efekty należy poczekać dłużej, nawet do 6 miesięcy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować żelu Sutricon w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podrażnienia i reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania preparatu.

Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami.

Przechowywanie

Produkt Sutricon żel należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem oraz wilgocią.