


Test Menopauza, 2 sztuki

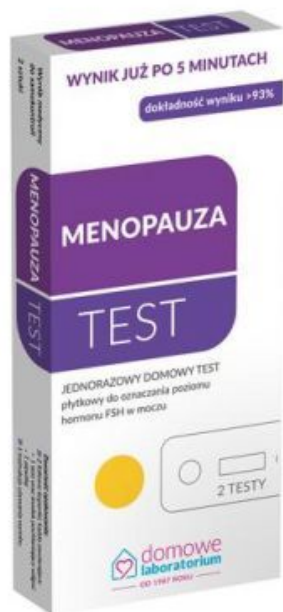

Cena: 24,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTIX SP. Z O.O.SP.K.

Opis produktu

Menopauza Test płytkowy jest szybkim testem wykrywającym w moczu hormonu FSH o stężeniu 25mIU/ml lub wyższym. Badanie najlepiej wykonywać z pierwszego porannego moczu, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu FSH. Wynik w postaci barwnych prążków pojawia się w ciągu ok. 3 minut. Wynik dodatni oznacza, że poziom hormonu FSH jest wyższy niż normalnie i możesz być w stadium perimenopauzy lub że menopauza już wystąpiła.

Dla pewności wykonujemy drugi test. Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że dokładność testu Menopauza Test wynosi 99,9%.

Wskazania

wykrycie w moczu hormonu FSH o stężeniu 25mIU/ml lub wyższym.

Sposób użycia

przed wykonaniem badania należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku test. Jeśli miesięczkujesz regularnie, ale obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy użyć w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego, tzn. w czasie od 2-go do 7-go dnia twojego cyklu #

miesięcznego#
i obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy wykonać w dowolnym dniu miesiąca i powtórzyć badanie przy użyciu drugiego testu z opakowania dokładnie tydzień później.

Opakowanie zawiera - 2 aluminiowe szczelnie zamknięte kopertki, w każdej znajdują się: 1 test płytkowy, 1 pipetka i 1 środek pochłaniający wilgoć. - 1 instrukcja używania wyrobu.

