

Trium Free, krople do oczu, 10 ml

Cena: 36,38 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Postać	krop.do oczu
Producent	FIDIA PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Trium free jest wskazany do nawilżania powierzchni oka w przypadku zmian pourazowych. Trium free jest właściwym wsparciem w przypadku pourazowych zmian powierzchni oka. Zawiera:

- 0,15% FHA 1.0 kwas hialuronowy klasy farmaceutycznej o wysokiej masie cząsteczkowej 1,1-1,7 MDa. Dzięki wysokiej masie cząsteczkowej kwasu hialuronowego krople silnie nawilżają, wspomagają reepitelizację rogówki i redukują stan zapalny
- wyciąg z miłorzębu japońskiego - działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, wspomagające regenerację włókien nerwowych, przywraca prawidłową czułość rogówki

Dawkowanie

Podawać 1-2 krople do worka spojówkowego 3 razy dziennie lub częściej.

Skład

Składnik główny

hialuronian sodu 0,15% (FHA 1.0®)

Pozostałe składniki

kwas borowy, czteroboran dwusodowy dziesięciowodny, wyciąg z Ginkgo biloba L., chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Potwierdzona nadwrażliwość na składniki produktu lub inne, podobne chemicznie substancje.

Instrukcje użycia

Przed pierwszym użyciem należy usunąć plastikowy pierścień zabezpieczający zakrętkę, pociągając za boczny, wystający element. Zdjąć zakrętkę. Obrócić butelkę dnem do góry nad okiem i ścisnąć jej boki palcem wskazującym i kciukiem, aż z butelki wypłynie kropla. W miarę wyczerpania się roztworu w butelce może być konieczne zastosowanie większej siły. Zamknąć ponownie butelkę zakrętką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku okulistycznego i zewnętrznego. Aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia roztworu należy upewnić się, że zakraplacz nie dotyka oka ani innych przedmiotów. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni oka podczas wkraplania nie należy dotykać oka zakraplaczem. W miarę wyczerpania się roztworu w butelce może być konieczne zastosowanie większej siły do uzyskania kropli. Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę. W przypadku jednoczesnego stosowania miejscowych leków okulistycznych należy skonsultować się z lekarzem. Nie używać produktu, jeżeli butelka z zakraplaczem OSD jest uszkodzona. Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Po zastosowaniu produktu może wystąpić lekkie pieczenie oka i przejściowy dyskomfort widzenia.

Skład

Składnik główny

hialuronian sodu 0,15% (FHA 1.0®)

Pozostałe składniki

kwas borowy, czteroboran dwusodowy dziesięciowodny, wyciąg z Ginkgo biloba L., chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na etykiecie butelki. Po pierwszym otwarciu produkt może być używany do upływu terminu ważności wskazanego na opakowaniu. Po zużyciu nie usuwać do środowiska.