

Urgo Pęcherze duży rozmiar - efekt podwójnej masy hydrokoloidowej, 5 sztuk



Cena: 17,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BIO-PROFIL POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Urgo Plastry na Duże Pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową działają, jak druga skóra. Absorbują wydzielinę powstającą w pęcherzu, tworząc żelową poduszczkę ochronną, która Natychmiast łagodzi ból.

- przyspieszają gojenie,
- chronią ranę, działając jak druga skóra,
- przynoszą długotrwałą ulgę i ochronę.

Działanie

Specjalnie zaprojektowane i niezwykle odporne plastry znakomicie pokrywają duże pęcherze, dopasowują się do kształtu stopy, skutecznie eliminują bolesne pęcherze. Urgo Plastry na duże pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową chronią skórę przed uciskiem i otarciami, natychmiast łagodząc ból. Plaster Urgo na duże pęcherze w kontakcie z pęcherzem tworzy ochronny hydrokoloidowy żel regenerujący skórę, który sprzyja szybszemu gojeniu się rany.

Zastosowanie

Urgo Plastry na pęcherze duży rozmiar przeznaczony do łagodzenia dolegliwości bólowych związanych z pęcherzami na stopach.

Informacje dodatkowe

Wyłącznie do jednorazowego użytku, nie wolno aplikować ponownie tego samego plastra, gdyż istnieje ryzyko infekcji. Nie przecinać

produktu. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Sposób użycia

- Nie przekuwaj pęcherza. Jeśli pęcherz jest już przebity, oczyść go wodą i mydłem oraz zastosuj środek antyseptyczny. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem Plastra Urgo.
- Usuń przezroczystą folię ochronną (oznaczoną strzałkami), unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Ogrzej plaster w dłoniach, po czym usuń warstwę ochronną.
- Nałóż plaster mocno na zmienioną skórę, upewniając się, że brzegi plastra są dobrze dociśnięte.
- Pozostaw plaster aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągaj go wzdłuż skóry, aż całkowicie się odklei.
- Zmieniaj plaster tak często, jak to konieczne.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.