

Urgo, Urgosterile 10x8cm, sterylne opatrunki samoprzylepne, 10 sztuk



Cena: 16,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Postać	-
Producent	URGO SP.Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Ochrona i zabezpieczenie ran powierzchniowych (otarcia, skaleczenia), szytych ran z niewielkim wysiękiem, ran pooperacyjnych. Ranę lub przecięcie uważa się za powierzchniowe, jeśli sięgają tylko warstwy skóry lub bezpośrednio powyżej tłuszczu podskórnego.

W przypadku, gdy powierzchniowa rana przekroczy głębokość 3 cm, należy skonsultować się z lekarzem w ciągu 6 godzin po wypadku w celu ustalenia, czy ranę powinno się opatrzyć szwami lub poddać zabiegowi (zastosować specjalny klej chirurgiczny,...).

Właściwości

- Przepuszczający powietrze, umożliwia
- Optymalne utrzymanie, nie pozostawia warstwy klejącej na skórzeoddychanie rany i pozwala unikać maceracji.
- Sterylny opatrunek zmniejszający ryzyko infekcji
- Z wysoką tolerancją skórą, łagodny dla skóry
- Dzięki warstwie nieprzywierającej do rany, kompres, wchłania wysięki bez przywierania do rany
- Przylegający z 4 stron, całkowicie chroni ranę

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić czy saszetka nie została naruszona.

- Ostrożnie oczyścić obszar, który ma być zabezpieczony i jego okolice.
- Wyjąć opatrunek z opakowania po wskazanej stronie i usunąć zakładkę ochronną.
- Nałożyć opatrunek tak, aby część środkowa opatrunku przykrywała całą ranę.
- Opatrunek powinien dobrze przylegać z 4 stron.
- Unikać naciągania opatrunku podczas aplikacji.

Opatrunek należy wymieniać tak często, jak to konieczne.

Skład

Urgosterile jest sterylnym opatrunkiem samoprzylepnym, z rozciągliwego, białego materiału włókninowego, pokrytego masą samoprzylepną wraz z integralnym, chłonnym kompresem z włókniny, pokrytym warstwą nieprzywierającą do rany. Sterylny opatrunek (sterylizowano tlenkiem etylenu).

Środki ostrożności

W przypadku osób poniżej 16. roku życia, produkt musi być aplikowany przez osobę dorosłą. Sterylny opatrunek do jednorazowego użytku. Nie należy używać ponownie ani zmieniać ułożenia już zastosowanego opatrunku: ryzyko zakażenia i zmniejszenia skuteczności mocowania i utrzymania opatrunku w jednym miejscu. Nie sterylizować ponownie. Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie bezpośrednio nie zostało naruszone. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Należy regularnie sprawdzać ranę i jej okolice, w celu wykrycia jakichkolwiek objawów zakażenia, takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk, nieprzyjemny zapach lub tworzenie się ropy. Nie stosować na głębokie rany nieopatrzone szwami, rany krwawiące lub z silnym wysiękiem.